

Gebrauchsanweisung Rollator R225, R225XL SB60 u. R225XL SB60



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Beschreibung des Rollators



Indikation

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator wird weitestgehend vormontiert geliefert. Entfernen Sie die Schraube und Sternmutter vom Rahmen. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen. Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit dem Einstecken der Schraube und ziehen Sie die Sternschraube fest an. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.



Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, klappen Sie zunächst die Sitzfläche nach vorne. Hängen Sie die Haken des Einkaufskorb in den Rahmen. Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten. Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kippisiko erhöht.



Rückenlehne montieren

Die Rückenlehne sollte nur montiert werden, wenn der Rollator in sicherer Position steht und die Bremsen betätigt sind. Nehmen Sie die Rückenlehne und drücken Sie die Clips mit den Zeigefingern hinein. Schieben Sie die Rückenlehne in die Führung. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht verkantet. Zum Entfernen der Rückenlehne gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremse kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremse härter) oder hinein (Bremse weicher). Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren.



Feststellbremsen

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt. Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus.



Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen Sie dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.



Gehstockhalterung

Der Rollator ist mit einer Halterung für Ihren Gehstock ausgestattet. Stellen Sie den Gehstock in die untere Schale und klemmen Sie ihn an der oberen Halterung fest.



Aufstellen

Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator. Drücken Sie die Querstreben nach unten und klappen Sie die Sitzfläche nach unten.



Zusammenfallen

Um Ihren Rollator Platz sparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen. Klappen Sie den Sitz nach oben. Nehmen Sie den Einkaufskorb heraus und ziehen die Querstreben nach oben. Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen.



Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

- Die Rahmentteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)
- Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Wiedereinsatz

- Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Technische Daten

	Rollator R225	Rollator R225 XL SB60	Rollator R225 XL SB65
Bereifung	PU-Bereifung	PU-Bereifung	PU-Bereifung
Material	Stahlrahmen (lackiert) Sitz PU	Stahlrahmen (lackiert) Sitz PU	Stahlrahmen (lackiert) Sitz PU
Farbe	silber	silber	silber
Sitzhöhe (cm)	56	56	56
Schiebegriffhöhe (cm)	82 - 95	80 - 96	80 - 96
Gesamtbreite (cm)	73	80	85
Gesamtlänge (cm)	64	64	64
Gesamthöhe (cm)	80 - 96	80 - 96	80 - 96
Gewicht (kg)	12	12,5	13
Zuladung Einkaufskorb (kg)	3	3	3
Max- Belastbarkeit (kg)	225	225	225

Wartung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren. Prüfen Sie, ob die Schrauben zur Fixierung des Sitzes am Auflagerrohr fest angezogen sind. Falls nicht, ziehen Sie die Schrauben bitte fest. Prüfen Sie, ob alle Steck- und Schnellverschlüsse richtig eingestellt und vollständig eingerastet sind. Prüfen Sie, ob alle Knöpfe der Steck- und Schnellverschlüsse sich einwandfrei lösen und wieder fixieren lassen. Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie Bereifung / Bowdenzüge / Bremsklötze usw.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 52 54- 94 79-0

Telefax: +49 (0) 52 54- 94 79-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: