

Gebrauchsanweisung Gehgestell „REZI“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Gehgestells keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Gehgestells. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Das Gehgestell wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- faltbares Gehgestell
- diese Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Das reziproke Gehgestell dient dem Benutzer als Ausgleich der Steh- und vor allem Gangunsicherheiten wenn eine verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten vorliegt. Bei der Anwendung des Gehgestells wird die Belastung der unteren Extremitäten mittels Kraft- und Abstützungseinsatz durch die oberen Extremitäten (evtl. auch des Rumpfes) gemindert. Bei dem Gehgestell sind die Seitenteile gegeneinander gelenkig bewegbar. Beim Fortbewegen bleiben immer zwei Standfüße auf dem Boden, während die Gegenseite des Gehgestells entsprechend dem Laufschrift nach vorne gesetzt wird. Somit wird der Aktionsradius des Anwenders erweitert.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Gehgestell unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Gehgestelles gegeben ist.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Das Gehgestell sollte nicht im Freien verwendet werden.
- Beachten Sie bei jeder Anwendung, dass sich das Gehgestell auf einem ebenen und festen Untergrund befindet.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- **Achtung!** Beim Gebrauch des reziproken Gehgestells besteht durch die beweglichen teile Klemmgefahr.
- Um Quetschungen zu vermeiden, fassen Sie das Gehgestell während des Gebrauchs immer in der Mitte der Handgriffe an.
- Das Kipprisiko kann bei starker einseitiger Belastung erhöht werden.
- **Kippgefahr!** Das Raufsetzen auf die Seitenteile und die vordere Querverstrebung ist untersagt.
- **Kippgefahr!** Einseitiges Abstützen oder Auflehnen auf das Gehgestell, besonders von den äußeren Seiten aus ist zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass nach jedem Auseinanderfalten des Gehgestells der Faltmechanismus vollständig ausgeklappt ist und somit keine erhöhte Sturzgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produktbeschreibung



Indikation

Die Verwendung des Gehgestells ist angezeigt bei Krankheitszuständen oder Verletzungsfolgen Personen mit Störungen des Bewegungsapparates und gleichzeitiger Koordination- bzw. Gleichgewichtsstörung Sicherung der Restgehfunktion Durchführung eines Gehtrainings Versorgung durch andere Gehhilfen ist nicht möglich

Kontraindikation

Die Verwendung des Gehgestells ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Höhenverstellung

Die Höhe des Gehgestells kann dem Patienten individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu den Federknopf am Teleskoprohr hinein. Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet. Sturzgefahr! Überprüfen Sie ob alle Teleskoprohre auf der gleichen Höhe eingestellt sind.



Benutzung

Stützen Sie sich auf den Handgriffen ab, so dass Sie eine sichere Standposition haben. Sie befinden sich im Allgemeinen immer zwischen den 4 Standbeinen. Die Seitenteile sind gegeneinander gelenkig bewegbar. Setzen Sie eine Seite des Gehgestells durch leichtes Anheben nach vorne. Dabei bleiben die Standbeine der anderen Seite auf dem Boden. Setzen sie anschließend den Fuß nach.



Zusammenfallen

Um Ihr Gehgestell platzsparend aufzubewahren, können Sie dies zusammenfallen lassen. Stellen Sie sich hinter das Gehgestell und drücken Sie den Federknopf ① unter dem Gummischutz nach unten. Führen Sie beide Seitenteile des Gehgestells nach innen zur Mitte ② wie auf der Abbildung dargestellt.



Auseinanderfallen

Um ihr Gehgestell wieder aufzustellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Stellen Sie sich hinter das Gehgestell wie in der Abbildung dargestellt. Bringen Sie die Seitenteile in die Position so dass sich diese rechtwinklig zu den Querstreben befindet ①. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf ② hörbar einrastet.



Reinigung

Das Gehgestell kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Wiedereinsatz

- Das Gehgestell ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Das Gehgestell muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Technische Daten

Gehgestell	Rezi
Max. Belastbarkeit (kg)	110
Gewicht (kg)	2,6
Breite (cm)	53
Tiefe (cm)	46 - 49
Höhe (cm)	75,0 – 93,0
Abstand zwischen den Handgriffen (cm)	48,0
Farbe	silber
Material	Aluminium eloxiert / Moosgummi

Wartung

Das Gehgestell ist wartungsfrei konzipiert. Sollte das Gehgestell defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Trendmobil GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn
Deutschland
Telefon.: +49 (0) 5254-9359-0
Telefax: +49 (0) 5254-9359-29
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: