

Duschhocker DHB 250 / DHB-R 250

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Der Duschhocker DHB 250 u. DHB-R 250 ist ggf. unter Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschhockers. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Duschhocker wird montiert in einem Karton geliefert.

- 1 Verpackung- und Transportkarton
- 1 Duschhocker mit Rückenlehne (Rückenlehne nur bei Mod. DHB-R 250)
- 4 Stuhlbeine (teleskopisierbar)

Indikation

Der Duschhocker bietet Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit beim Duschen eine Sitzgelegenheit.

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschhockers ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit



Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr DHB Modell unverseht ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

- Achten Sie darauf, dass der Duschhocker stets fest und sicher auf allen vier Füßen steht.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- Besondere Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, besonders dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Duschhockers gegeben ist.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen vergrößert werden.
- Falls Sie sich selbst nicht ausreichend halten können, bitten Sie eine Hilfsperson um Unterstützung.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Höhenverstellung der Stuhlbeine

Die Sitzhöhe kann durch Höhenverstellung der Stuhlbeine dem Patienten individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu den Federknopf am Stuhlbein in das Teleskoprohr. Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet. Sturzgefahr! Überprüfen Sie ob alle Stuhlbeine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.



Reinigung

Der Duschhocker sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Dieser kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden oder bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Technische Daten

	<u>Art.-Nr.DHB 250</u> 11000014	<u>Art.-Nr. DHB-R 250</u> 11000015
Tiefe	54 cm	54 cm
Breite	67 cm	67 cm
Höhe	44-53 cm	68-87 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzbreite	56 cm	61 cm
Sitzhöhe	44-53 cm	44-53 cm
Rückenhöhe	-	43 cm
Gewicht	3 kg	3,5 kg
Belastbarkeit	250 kg	250 kg
Farbe	Silber/ Weiß	Silber/ Weiß
Material	Aluminium/ HDPE	Aluminium/ HDPE

Wartung

Der Duschhocker ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschhocker defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn
Deutschland

Telefon. +49 (0) 5254-9479 0
Telefax: +49 (0) 5254- 9479 499

E-Mail: info@trendmobil.com
Web: www.trendmobil.com

Ihr Fachhändler:

