

Gebrauchsanweisung Badewannen-Einhängesitz „BWE“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Badewannen-Einhängesitz keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Badewannensitzes. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Badewannen-Einhängesitz wird in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Einhängesitz mit Sitzfläche
- diese Gebrauchsanweisung

Indikation

Die Verwendung des Badewannen-Einhängesitzes ist angezeigt,

- wenn selbstständiges Ein- und Aussteigen aus der Badewanne bzw. Hin- und Aufsetzen nicht mehr möglich ist
- bei Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten

Kontraindikation

Die Verwendung des Badewannen-Einhängesitzes ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Badewannensitz unversehrt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Achtung! Bei der Montage der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Kippgefahr! Durch starke einseitige Belastung erhöht sich das Kipprisiko.
- Das Besteigen des Badewanneneinhängesitzes ist untersagt - Abrutschgefahr!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Zweckbestimmung

Der Badewannen-Einhängesitz wird in der Badewanne benutzt um eine erhöhte Sitzposition zu erreichen die sich auf ca. 50 % der Wannentiefe befindet. Es ermöglicht somit eine Ganzkörperreinigung bei eingeschränkter Mobilität aber noch ausreichend Sitzfähigkeit.

Produktbeschreibung




Demontage der Sitzfläche

Legen Sie die Sitzfläche auf den Rahmen. Mit leichtem Kraftaufwand von oben rastet diese ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche fest sitzt.



Anpassung an die Badewannenbreite

Um den Badewannen-Einhängesitz an die Wannbreite anzupassen, können die Auflagepunkte verstellt werden. Lösen Sie die Kreuzschlitzschrauben (es ist nicht erforderlich die Schrauben komplett zu entfernen). Ziehen Sie die Auflagen rechts und links gleichmäßig heraus und passen Sie die Auflagen an die Wannbreite an. Ziehen Sie die Kreuzschlitzschrauben wieder fest an.

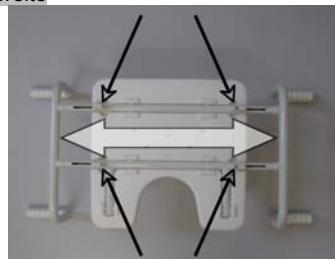

Demontage der Sitzfläche

Zur erleichterten Reinigung kann die Sitzfläche entfernt werden. Fassen Sie dazu an der Sitzfläche an und ziehen Sie diese an einer Seite nach oben und entfernen diese so.



Reinigung und Desinfektion

Der Badewannen-Einhängesitz sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der Badewannen-Einhängesitz kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Technische Daten

Duschstuhl	BWE
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	2,7
Gesamtbreite (cm)	72-88
Gesamttiefe (cm)	42
Gesamthöhe (cm)	27,5
Sitzbreite (cm)	41
Sitztiefe (cm)	40
Verringerung der Badewannentiefe (cm)	20
Farbe	weiß
Material	Aluminium lackiert, ABS

Wartung

Der Einhängesitz ist wartungsfrei. Sollte der Duschstuhl defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: