

Bedienungsanleitung

DBS-A (drehbarer Badewannensitz)



Bedienungsanleitung DBS-A

Sehr geehrter Benutzer,
sehr geehrte Benutzerin,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes aus dem Hause der TRENDMOBIL GmbH.

Die Bedienungsanleitung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer, sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für die sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Badewannensitzes.

Für eine sichere Nutzung und um gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang:

Der drehbare Badewannensitz wird in zwei Teile zerlegt in einem Karton geliefert.

Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- 1 x Verpackungs - / Transportkarton
- 1 x Rahmenkonstruktion mit Armlehnen, Rückenlehne und Sitzfläche
- 1 x Gestell für die Badewanne
- 1 x Bedienungsanleitung

Zweckbestimmung:

Der drehbare Badewannensitz ermöglicht behinderten Personen, annähernd auf die Höhe des Badewannenrandes, sitzend die Vorgänge der Körperreinigung durchzuführen.

Die Badewanne kann somit genutzt werden, ohne dass hierfür ein Niederlassen auf den Wannenboden notwendig ist.


Die Funktion der Drehbarkeit erleichtert das Platznehmen auf dem Badewannensitz, sowie das Verlassen dieses.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Badewannensitz unversehrt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der drehbare Badewannensitz eine stabile Position auf der Badewanne hat.
- Achtung! Beim Gebrauch der Drehfunktion können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Durch starke einseitige Belastung erhöht sich die Kippgefahr.
- Es ist untersagt, sich mit den Füßen auf den Badewannensitz zu stellen, da Abrutschgefahr besteht.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produktbeschreibung

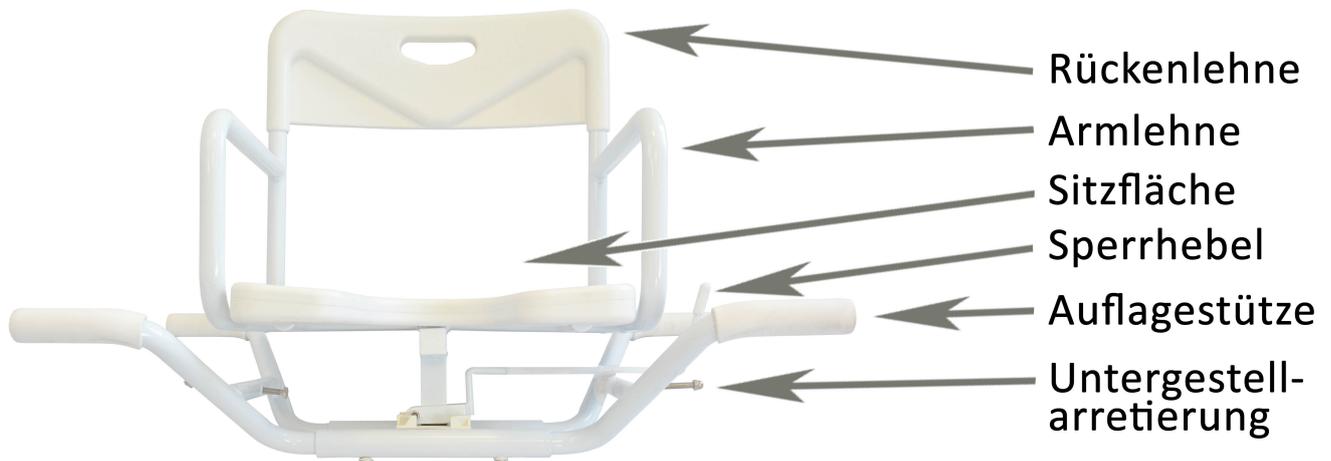

Indikation:

Die Verwendung des drehbaren Badewannensitzes ist angezeigt bei

- Wenn selbstständiges Ein- und Aussteigen aus der Badewanne bzw. Hin- und Aufsetzen nicht mehr möglich ist.
- Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren und / oder oberen Extremitäten
- Funktionelle Störungen der Rumpfbewegung- /haltung

Kontraindikation:

Die Verwendung des drehbaren Badewannensitzes ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen

Reinigung:

Der drehbare Badewannensitz sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Der DBS-A kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden und bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Wartung:

Der drehbare Badewannensitz ist für den Wiedereinsatz geeignet.

Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche

Wiedereinsatz:

Der Badewannensitz ist für den Wiedereinsatz geeignet.

Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben.

Der Badewannensitz muss vor der Weitergabe gereinigt, desinfiziert, gewartet und vom Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Garantie:

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum.


Diese Gewährleistung beinhaltet Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurück zu führen sind.

Aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind ausgeschlossen.

Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.


Zusammenbau des Badewannensitzes

Nehmen Sie das Gestell und die Rahmenkonstruktion. Stecken Sie die Rahmenkonstruktion auf dem Zapfen am Gestell.
Achtung! Die Rahmenteile rasten nicht ein.

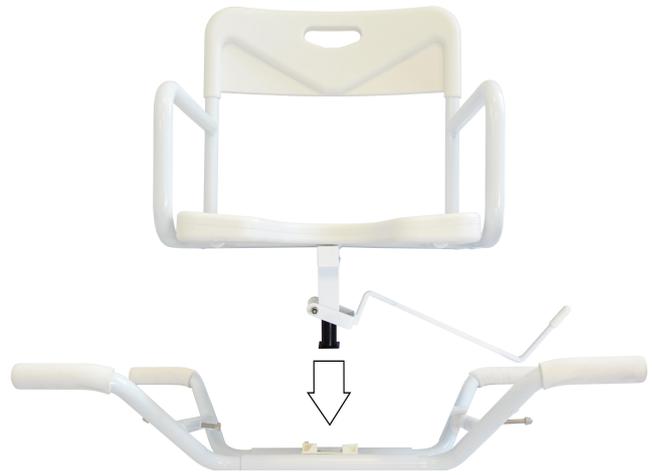

Montage des Badewannensitzes

Setzen Sie den Badewannensitz von oben auf den Rand Ihrer Badewanne, so dass die rutschhemmenden Gummikappen Kontakt mit diesem haben.
Mit den Stellschrauben (siehe kleine Pfeile) kann der Badewannensitz gegen Verschiebung gesichert werden.
Drehen Sie die Stellschrauben rechts und links gleichmäßig gegen die Innenwand der Badewanne.
Vergewissern Sie sich, dass der Badewannensitz eine stabile Position hat.

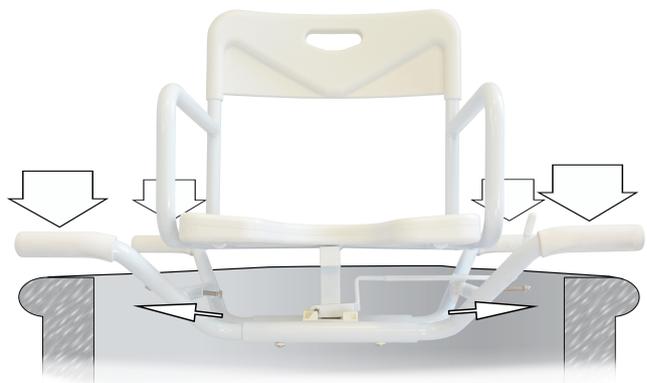

Benutzung

Der Sitz lässt sich in 90° Stufen in die gewünschte Position drehen.
Ziehen Sie hierzu den Hebel nach oben, wie auf der Abbildung dargestellt.
Nun kann der Sitz gedreht werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Sitz hörbar in eine Endposition einrastet.



Auseinanderbauen des Badewannensitzes

Trennen Sie das Rahmenteil durch gleichmäßigen Kraftaufwand vom Gestell



Technische Daten

Maximale Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	7,8
Sitzbreite (cm)	41
Sitztiefe (cm)	40
Gesamtbreite (cm)	80,85,90
Gesamttiefe (cm)	52
Gesamthöhe (cm)	61
Armlehnhöhe (cm)	20
Farbe	Weiß
Material (Rahmen)	Aluminium

Ihr Fachhändler:

TRENDMOBIL GmbH
Fohling 24
33106 Paderborn
Deutschland



Telefon: +49 (0) 5254 – 9479 – 0
Telefax: +49 (0) 5254 – 9479 - 299

E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com