

Gebrauchsanweisung Duschstuhl mit Hygieneausschnitt – Faltbar „DS1100-F“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Duschstuhls keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschstuhls. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.




Lieferumfang

Der Duschstuhl wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Faltbarer Duschstuhl
- diese Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

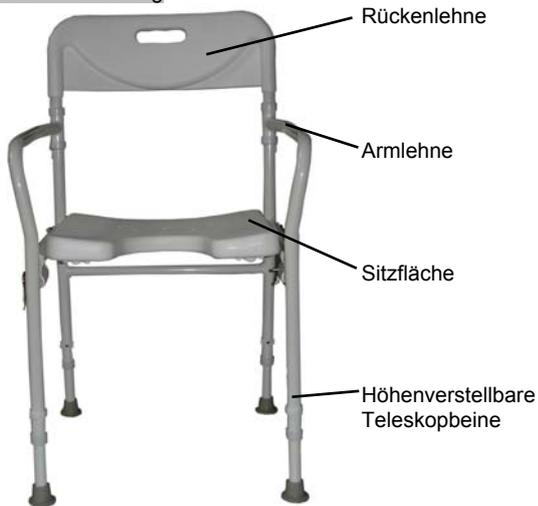

Indikation

Die Verwendung des Toilettenstuhls ist angezeigt bei

- Patienten mit Standunsicherheiten oder Stehunsicherheit
- Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten
- Rumpfhaltungsschwäche so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch möglich ist

Kontraindikation

Die Verwendung der Toiletensitzerhöhung ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Duschstuhl unversehrt ist.

- Achten Sie vor jeder Benutzung auf einen festen Stand des Duschstuhls.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Achten Sie darauf, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.
- Achtung! Beim Einrasten der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Achtung! Bei starker einseitiger Gleichgewichtsverlagerung erhöht sich das Kipprisiko.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Zweckbestimmung

Der Duschstuhl bietet für Personen mit beeinträchtigter Stehfähigkeit eine Sitzmöglichkeit im Bereich der Dusche. Die vorhandenen Armlehnen bieten die Möglichkeit des Abstützens und eine Sicherheit gegen seitliches Herunterfallen. Die Sitzfläche weist einen Hygieneausschnitt auf, der die Zugänglichkeit des Gesäß- und Genitalbereiches erleichtert.

Montage des Duschstuhls

Der Duschstuhl wird vormontiert und gefaltet geliefert. Zum Entfalten klappen Sie zunächst ein Seitenteil rechtwinklig zum Rückteil nach vorne



Gehen Sie bei dem anderen Seitenteil genauso vor



Klappen Sie nun die Sitzfläche nach unten und lassen Sie diese hörbar in die Halteklammer einrasten. Stecken Sie abschließend die Sicherungsstifte auf beiden Seiten in die Bohrung neben den Halteklammern der Sitzfläche. Vergewissern Sie sich, dass der Duschstuhl stabil zusammengebaut ist und alle Verbindungen fest sind.



Zusammenfallen des Duschstuhls


Um ihren Duschstuhl platz sparend aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen lassen. Gehen Sie beim Zusammenfallen in umgekehrter Reihenfolge vor. Klappen Sie zunächst die Sitzfläche nach oben. Klappen Sie nun die Seitenteil nach hinten.



Höhenverstellung

Die Höhe des Duschstuhls kann individuell an die Größe des Benutzers angepasst werden
Lösen Sie zunächst den Clip am Stuhlbein

Bringen Sie nun das Teleskoprohr in die gewünschte Position
Stecken Sie den Clip wieder in die nächstliegende Bohrung
Gehen Sie bei allen Stuhlbeinen gleichermaßen vor
Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden

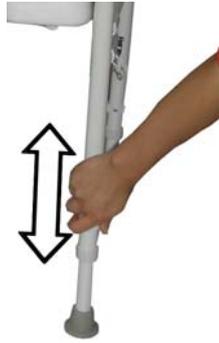

Reinigung und Desinfektion

Der Duschstuhl sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der DS1100-F kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Technische Daten

Duschstuhl	DS1100-F
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	4,2
Gesamtbreite (cm)	52
Gesamtiefe (cm)	51
Gesamthöhe (cm)	99
Sitzbreite (cm)	40
Sitztiefe (cm)	40
Sitzhöhe (cm)	49-59
Armlehnenhöhe (cm)	20
Farbe	weiß
Material	pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, ABS

Wartung

Der Duschstuhl ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschstuhl defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: