

## Gebrauchsanweisung Duschstuhl mit Hygieneausschnitt „DS1100“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Duschstuhls keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschstuhls. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

### Lieferumfang

Der Duschstuhl wird in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Duschstuhl mit Hygieneausschnitt
- diese Gebrauchsanweisung

### Indikation

Die Verwendung des Duschstuhls ist angezeigt bei


- Patienten mit Standunsicherheiten oder Stehunsfähigkeit
- Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten
- Rumpfhaltungsschwäche so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch möglich ist

### Kontraindikation

Die Verwendung des Duschstuhls ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

### Produktbeschreibung

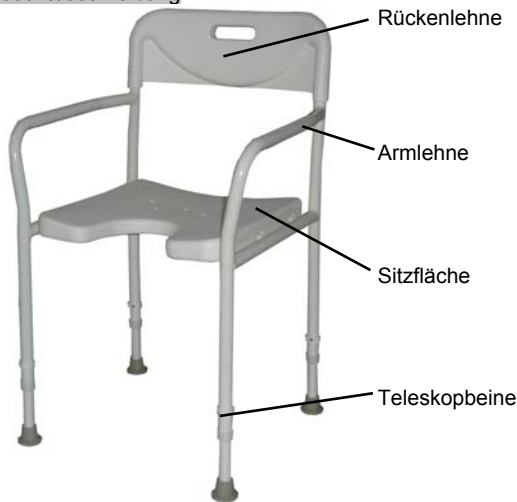

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Duschstuhl unversehrt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Duschstuhl sicher auf dem Boden steht.
- Achten Sie darauf, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.
- Achtung! Beim Herunterklappen der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Kippgefahr! Durch starke einseitige Belastung erhöht sich das Kippisiko.
- Das Besteigen des Duschstuhls ist untersagt - Abrutschgefahr!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

### Zweckbestimmung

Der Duschstuhl bietet für Personen mit beeinträchtigter Stehfähigkeit eine Sitzmöglichkeit im Bereich der Dusche. Die vorhandenen Armlehnen bieten die Möglichkeit des Abstützens und eine Sicherheit gegen seitliches Herunterfallen. Die Sitzfläche weist einen Hygieneausschnitt auf, der die Zugänglichkeit des Gesäß- und Genitalbereiches erleichtert.


### Montage der Sitzfläche

Legen Sie die Sitzfläche auf den Rahmen. Mit leichtem Kraftaufwand von oben rastet diese ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche fest sitzt.



### Höhenverstellung

Um den Duschstuhl individuell auf die Körpergröße anzupassen, kann die Höhe verstellt werden. Entfernen Sie dazu den Clip. Bringen Sie das Teleskoprohr des Stuhlbeins auf die gewünschte Höhe. Stecken Sie nun den Clip wieder in die nächstliegende Bohrung. Gehen Sie bei allen Stuhlbeinen in gleicher Reihenfolge vor. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.

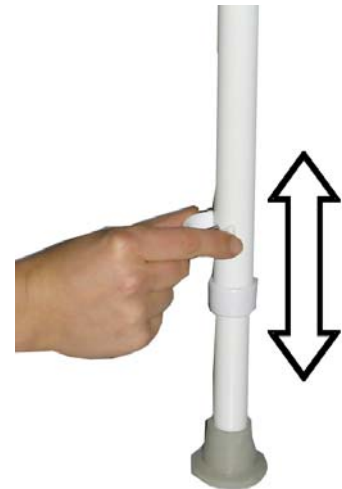

#### Demontage der Sitzfläche

- Zur Erleichterten Reinigung kann die Sitzfläche entfernt werden
- Fassen Sie dazu die Sitzfläche an einer Seite an und ziehen Sie die nach oben heraus



#### Reinigung und Desinfektion

Der Duschstuhl sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der DS1100 kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

#### Technische Daten

Duschstuhl	DS1100
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	3,5
Gesamtbreite (cm)	52
Gesamttiefe (cm)	46
Gesamthöhe (cm)	95
Sitzbreite (cm)	40
Sitztiefe (cm)	40
Sitzhöhe (cm)	45-50
Armlehnenhöhe (cm)	20
Farbe	weiß
Material	Aluminium, ABS

#### Wartung

Der Duschstuhl ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschstuhl defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

#### Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

#### Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: [info@trendmobil.com](mailto:info@trendmobil.com)

Internet: [www.trendmobil.com](http://www.trendmobil.com)



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: