

Gebrauchsanweisung Duschklappsitz „DUS“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Duschklappsitzes keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschklappsitzes. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Duschklappsitz wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Duschklappsitz
- diese Gebrauchsanweisung
- Befestigungsmaterial nicht enthalten

Zweckbestimmung

Der Duschklappsitz bietet für Personen mit beeinträchtigter Stehfähigkeit eine Sitzmöglichkeit im Bereich der Dusche. Der Duschklappsitz ist mit einer Sitzfläche mit einer Einrichtung zur Wandbefestigung ausgestattet. Die Sitzfläche weist einen Hygieneausschnitt auf, der die Zugänglichkeit des Gesäß- und Genitalbereiches erleichtert.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Duschklappsitz unversehrt ist.

- Der Duschklappsitz kann an Wänden aus Beton, Vollziegel, Gasbeton und Hohllochziegel sicher befestigt werden. Bei Trockenbauwänden dürfen Sie den Duschklappsitz nur montieren, wenn Sie eine Unterkonstruktionsverstärkungsplatte für Wandhängende Lasten verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Achten Sie darauf, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.
- Achtung! Beim Einrasten der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Das Besteigen des Duschklappsitzes ist untersagt - Abrutschgefahr!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produktbeschreibung



Indikation

Die Verwendung des Duschklappsitzes ist angezeigt bei Patienten mit Standunsicherheiten oder Stehfähigkeit Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten Rumpfhaltungsschwäche so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch möglich ist

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschklappsitzes ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Höhenverstellung

- Die Höhe des Duschklappsitzes kann individuell an die Größe des Benutzers angepasst werden
- Lösen Sie zunächst den Clip am Stuhlbein
- Bringen Sie nun das Teleskoprohr in die gewünschte Position
- Stecken Sie den Clip wieder in die nächstliegende Bohrung
- Gehen Sie bei allen Stuhlbeinen gleichermaßen vor
Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden



Befestigung an der Wand

- Die Einstellung der Sitzhöhe sollte vom Fachmann vorgenommen werden
- Als Maß nehmen Sie einen normalen Stuhl auf dem der Benutzer bequem sitzen kann
- Messen Sie die Sitzhöhe des Stuhls
- Wählen Sie aus den einstellbaren Höhen des Duschklappsitzes das Maß was das dem ermitteltem Maß am nächsten kommt
- Übertragen Sie die Bohrungen der Befestigungsplatte vom Boden der Duschtasse aus auf die Wand
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein
- Das Befestigungsmaterial ist dem Lieferumfang nicht beigelegt
Benötigt werden 8 Schrauben und 8 Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie 8 der Wandbeschaffenheit angepasste Dübel



Auf- und Anklappen

- Der Duschklapsitz kann bei Nichtgebrauch Platz sparend nach oben oder unten geklappt werden
 - Der Duschklapsitz bleibt dabei an der Wand montiert
- Fassen Sie dazu immer an der Sitzfläche an und klappen Sie den Sitz nach oben oder unten. Klemmgefahr!



Reinigung und Desinfektion

Der Duschklapsitz sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der DUS kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Technische Daten

Duschklapsitz	DUS
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	3
Gesamtbreite (cm)	47
Gesamttiefe (cm)	50
Gesamthöhe (cm)	47-57
Sitzbreite (cm)	40
Sitztiefe (cm)	40
Sitzhöhe (cm)	49-59
Farbe	weiß
Material	pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, ABS

Wartung

Der Duschklapsitz ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschklapsitz defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: