



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung der Toilettensitzerhöhung keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihrer Toilettensitzerhöhung. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Die Toilettensitzerhöhung wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Toilettensitzerhöhung Modell TS10D
- diese Gebrauchsanweisung
- 2 Halteklammern

Indikation

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist angezeigt bei:

- Personen mit eingeschränkter Fähigkeit des Hinsetzens und Aufstehens
- Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle
- Personen mit Gleichgewichtsstörung
- Personen mit erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten
- Deutlich eingeschränkte oder vollständig aufgehobene Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke

Kontraindikation

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Produktbeschreibung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihre Toilettensitzerhöhung unversehrt ist.

- Achten Sie vor jeder Benutzung auf einen festen Sitz der Befestigungsschrauben.
- Die maximale Belastung bezieht sich nicht auf den Deckel.
- Der Deckel ist nicht zum Sitzen geeignet.
- Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zum Dauersitzen geeignet.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Zweckbestimmung

Die Toilettensitzerhöhung dient dem Benutzer als WC-Beckenranderhöhung. Durch Befestigungsklammern an der Unterseite kann diese auf dem WC-Becken fixiert werden.

Zusammenbau

Führen Sie die Halteklammern in die Nut auf der Unterseite des Sitzkorpus. Drehen Sie die Kunststoffschraube unter leichtem Druck in das Gewinde des Sitzbeckens.



Montage

Schrauben Sie den Toilettendeckel an Ihrer Toilettenschüssel ab. Legen Sie die Toilettensitzerhöhung auf die Toilettenschüssel. Ziehen Sie die Halteklammern mit normaler Handkraft rechts und links gleichmäßig an, so dass die Toilettensitzerhöhung ausreichend fest sitzt. Prüfen Sie den festen Sitz der Toilettensitzerhöhung. Achtung! Ziehen Sie die Halteklammern nicht mit



Gewalt an, dies führt zu einer Materialbeschädigung. Ist mit normaler Handkraft kein fester Sitz der Toilettensitzerhöhung erreichbar, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und tauschen das Produkt aus.

Reinigung

Die Toilettensitzerhöhung können Sie mit milden Reinigungsmitteln reinigen. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Wiedereinsatz

- Die Toilettensitzerhöhung ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Die Toilettensitzerhöhung muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Technische Daten

Toilettensitzerhöhung		TS10D
Max. Belastbarkeit (kg)		250
Gewicht (kg)		1,1
Sitzbreite (cm)		37
Tiefe (cm)		41
Höhe (cm)		11
Sitzerhöhung in (cm)		10
Farbe		weiß
Material		PSA

Wartung

Die Toilettensitzerhöhung ist wartungsfrei konzipiert. Sollte die Toilettensitzerhöhung defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: 05254 9479-0

Telefax: 05254 9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler: