

## Gebrauchsanweisung Gehgestell „GEBO“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Gehgestells keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Gehgestells. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

### Lieferumfang

Das Gehgestell wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- faltbares Gehgestell
- diese Gebrauchsanweisung

### Zweckbestimmung

Das Gehgestell „GEBO“ ist ein starres Gehgestell und dient dem Benutzer als Ausgleich der Steh- und vor allem Gangunsicherheiten wenn eine verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten vorliegt. Bei der Anwendung des Gehgestells wird die Belastung der unteren Extremitäten mittels Kraft- und Abstützungseinsatz durch die oberen Extremitäten (evtl. auch des Rumpfes) gemindert. Das Gehgestell wird beim Laufen jeweils Schritt für Schritt nach vorne gesetzt. Der Benutzer bewegt sich dabei im Wesentlichen immer zwischen den vier Standfüßen, wodurch eine hohe Standsicherheit gewährleistet wird und der Aktionsradius des Anwenders erweitert wird.

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Gehgestell unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Gehgestelles gegeben ist.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Das Gehgestell sollte nicht im Freien verwendet werden.
- Beachten Sie bei jeder Anwendung, dass sich das Gehgestell auf einem ebenen und festen Untergrund befindet.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- Das Kippisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen vergrößert werden.
- Kippgefahr! Das Raufsetzen auf die Seitenteile und die vordere Querverstrebung ist untersagt.
- Vergewissern Sie sich, dass nach jedem Auseinanderfalten des Gehgestells der Faltmechanismus vollständig ausgeklappt ist und somit keine erhöhte Sturzgefahr besteht.

Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

### Produktbeschreibung



### Indikation

Die Verwendung des Gehgestells ist angezeigt bei Krankheitszuständen oder Verletzungsfolgen Personen mit Störungen des Bewegungsapparates und gleichzeitiger Koordination- bzw. Gleichgewichtsstörung Sicherung der Restgehfunktion Durchführung eines Gehtrainings Versorgung durch andere Gehhilfen ist nicht möglich

### Kontraindikation

Die Verwendung des Gehgestells ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

### Höhenverstellung

Die Höhe des Gehgestells kann dem Patienten individuell angepasst werden.

Drücken Sie dazu den Federknopf am Teleskoprohr hinein.

Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position.

Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet.

Sturzgefahr!

Überprüfen Sie ob alle Teleskoprohre auf der gleichen Höhe eingestellt sind.



### Benutzung

Stützen Sie sich auf den Handgriffen ab, so dass Sie eine sichere Standposition haben.

Sie befinden sich im Allgemeinen immer zwischen den 4 Standbeinen

Setzen Sie das Gehgestell beim Laufen Stück für Stück durch leichtes Anheben nach vorn.



### Zusammenfallen

Um Ihr Gehgestell Platz sparend aufzubewahren, können Sie dies Zusammenfallen. Stellen Sie sich hinter das Gehgestell und drücken Sie den Federknopf ① unter dem Gummischutz nach unten. Führen Sie beide Seitenteile des Gehgestells nach innen zur Mitte ② wie auf der Abbildung dargestellt.



### Auseinanderfallen

Um ihr Gehgestell wieder aufzustellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Stellen Sie sich hinter das Gehgestell wie in der Abbildung dargestellt ist. Bringen Sie die Seitenteile in die Position so dass sich diese rechtwinklig zu den Querstreben befindet ①. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf ② hörbar einrastet.



### Reinigung

Das Gehgestell kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

### Wiedereinsatz

- Das Gehgestell ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Das Gehgestell muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

### Technische Daten

Gehgestell	GEBO
Max. Belastbarkeit (kg)	110
Gewicht (kg)	2,6
Breite (cm)	53,0
Tiefe (cm)	46 - 49
Höhe (cm)	75,0 – 93,0
Abstand zwischen den Handgriffen (cm)	47,0
Farbe	silber
Material	Aluminium eloxiert / Moosgummi

### Wartung

Das Gehgestell ist wartungsfrei konzipiert. Sollte das Gehgestell defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

### Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

### Trendmobil GmbH

Fohling 24  
33106 Paderborn  
Deutschland  
Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0  
Telefax: +49 (0) 5254-9479-499  
E-Mail: [info@trendmobil.com](mailto:info@trendmobil.com)  
Internet: [www.trendmobil.com](http://www.trendmobil.com)



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: