



Bedienungsanleitung

Rollator

mit verlängerten Schieberohren
(Gehwagen)

Art. Nr: 14000061



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort
2. Ihre Sicherheit
3. Handhabung
4. Lieferumfang
5. Technische Daten
6. Garantie
7. Reinigung/Entsorgung

1.1 Vorwort

**Sehr geehrte Benutzerin,
sehr geehrter Benutzer,**

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses.

Die Bedienungsanleitung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszus schöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Der Rollator wird im Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Überprüfen Sie bitte umgehend den Paketinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

2.1 Wartung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren. Prüfen Sie, ob die Schrauben zur Fixierung des Sitzes am Auflagerohr fest angezogen sind. Falls nicht, ziehen Sie die Schrauben bitte fest. Prüfen Sie, ob alle Steck- und Schnellverschlüsse richtig eingestellt und vollständig eingerastet sind. Prüfen Sie, ob alle Knöpfe der Steck- und Schnellverschlüsse sich einwandfrei lösen und wieder fixieren lassen. Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

2.2 Indikation (Anwendungsgebiete)

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

2.3 Kontraindikation (nicht geeignet)

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

3.1 Beschreibung

der Baugruppen Ihres Rollator m. verl. Schieberohren.



3.2 Handgriffe montieren/Höhenverstellung

Der Rollator wird vormontiert geliefert. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen, positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit Festziehen der Hebel. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.




3.3 Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen in die am Rahmen vorhandenen Haken. Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten. Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht.



3.4 Tablett montieren

Der Rollator muss entfaltet sein. Legen Sie das Tablett von oben auf das Sitzpolster. Die vier Zapfen auf der Unterseite des Tablett passen zu den Aussparungen auf dem Sitzpolster. Drücken Sie das Tablett fest in die Aussparungen.

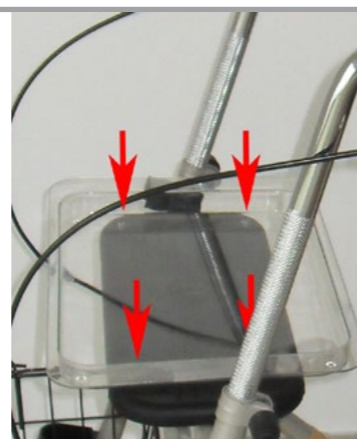

3.5 Einstellen der Bremsen

Die Bremse des Rollator kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremse härter) oder hinein (Bremse weicher). Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren.



3.6 Feststellbremsen

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt. Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus.



3.7 Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.




3.8 Aufstellung

Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie (wie im Abschnitt 3.7 beschrieben) die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator. Drücken Sie die Sitzfläche nach unten und schließen Sie den Sicherungshebel (siehe Punkt 3.8.1 Abbildung A und B).




3.8.1 Abbildung Riegel

Abbildungen des Sicherungsriegel für die Punkte 3.8 und 3.9.

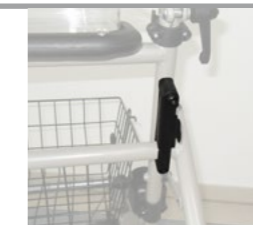

A. Riegel gesichert

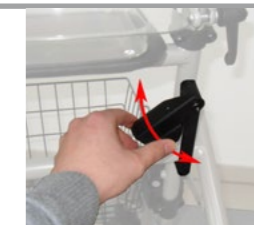

B. Riegel justieren



C. Riegel offen



Rollator
verl. Schieberohre
Gehwagen
3 Handhabung
4 Lieferumfang
5 Technische Daten



Rollator
verl. Schieberohre
Gehwagen
Garantie
Reinigung/Entsorgung

3.9 Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen. Bitte den Tragekorb und das Tablett vorher entfernen. Lösen Sie zunächst den Sicherungsriegel (siehe Punkt 3.8.1 Abbildung B und C) am Rahmen, um den Faltvorgang zu ermöglichen. Betätigen Sie die Bremse wie im Abschnitt 3.6 beschrieben. Ziehen Sie den Rollator an den Handgriffen zu sich heran. Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen.



4.1 Lieferumfang

- Rollator m. verl. Schieberohren
- Bedienungsanleitung

5.1 Technische Daten

Bereifung.....	PU-Bereifung
Material.....	Stahlrahmen (lackiert), Sitzfläche PU, Tablett PE
Farbe.....	silber
Sitzhöhe (cm).....	59
Sitzbreite (cm).....	38
Schiebegriffhöhe (cm).....	98 – 118
Gesamtbreite (cm).....	60
Gesamtlänge (cm).....	70
Gesamthöhe (cm).....	118
Gewicht (kg).....	10
Zuladung Einkaufskorb (kg).....	3
Max- Belastbarkeit (kg).....	120

6.1 Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleissteile wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

7.1 Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

- Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)

Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

7.2 Wiedereinsatz

- Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

7.3 Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produkts und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Vertragshändler.





Rollator
verl. Schieberohre
Gehwagen



Leben in Bewegung

TRENDMOBIL GmbH
Fohling 24
33106 Paderborn
Deutschland

Ihr Fachhändler:

Telefon.: +49 (0) 5254 - 9479 - 0
Telefax: +49 (0) 5254 - 9479 - 499

E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com