

Gebrauchsanweisung

Toilettenstuhl „TSF220“



CE

Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Der Toilettenstuhl ist mit vier 5 Zoll Rädern ausgestattet und ist ggf. in Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen.


Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Toilettenstuhles. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie sie griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Toilettenstuhl wird ihm Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient.

Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Gestell mit montierter Bereifung
- Rückenlehne mit Armlehnen
- Abdeckpolster für montierte Sitzbrille
- 1 Eimer mit Deckel
- Gebrauchsanweisung

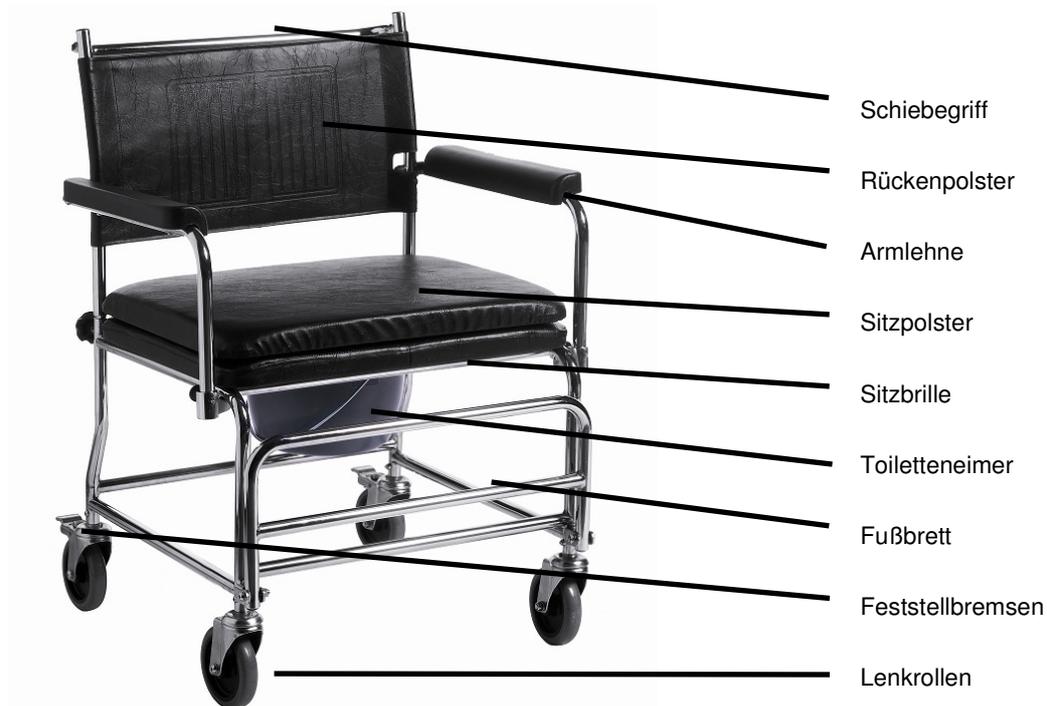

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Toilettenstuhl auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr TSF220 unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind und die Bremsen funktionstüchtig sind.
- Achten Sie darauf, dass der Toilettenstuhl stets vor dem Wegrollen durch Betätigung der Feststellbremse gesichert ist.
- Der Toilettenstuhl ist nur für den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als Zweckentfremdung betrachtet.
- Die Benutzung darf ausschließlich im Innenraum und auf festem Untergrund erfolgen.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen oder Beladung vergrößert werden.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrampen.
- Stellen Sie sich nie beim Ein- und Aussteigen auf das Fußbrett
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Indikation

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist. Der TSF220 kann zusätzlich als Sitzgelegenheit und Zimmerrollstuhl, wenn von einer Begleitperson geschoben genutzt werden

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschstuhls ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Montage

- Drehen Sie zuerst beide Feststellschrauben am Rahmen heraus
- Schieben Sie die Rohre der Rückenlehne in den Rahmen
- Ziehen Sie die Feststellschrauben wieder fest an



Bringen Sie nach der Montage die Armlehnen in die waagerechte Position

Der TSF220 ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet, wobei die hinteren Rollen mit Totalfeststeller ausgeführt sind. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt.

- Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe
- Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wipphebel, der TSF ist nun wieder bewegbar

Wegklappen der Armlehnen

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Ziehen Sie den Hebel an den Armlehnen zu sich. Nun können Sie die Armlehne nach unten schwenken. Um diese wieder zu montieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Vergewissern Sie sich, dass der Hebel wieder hörbar eingerastet ist



Ein- und Aussteigen von Vorn

- Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
- Das Fußbrett kann zum leichteren Ein- und Aussteigen hoch geschwenkt werden

Sobald Sie sicher Platz genommen haben bringen Sie das Fußbrett wieder in die normale Position

Ein- und Aussteigen von der Seite

- Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
- Die Armlehnen können zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach unten geschwenkt werden zuvor beschrieben

Sobald Sie wieder sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Armlehnen wieder in die Ausgangsposition

Benutzung als Toilettenstuhl

- Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
- Zur Benutzung als Toilettenstuhl schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz
- Entfernen Sie die Hygieneabdeckung

Entfernen Sie den Eimer nach der Benutzung und verschließen Sie ihn mit dem Deckel



Nach der Benutzung als Toilettenstuhl

- Entfernen Sie den Toiletteneimer erst nachdem die Person nicht mehr auf dem Toilettenstuhl sitzt, sonst besteht Klemmgefahr.
- Legen Sie den Deckel auf
- Reinigen Sie anschließend das Produkt mit allen erforderlichen Maßnahmen

Reinigung

Der Toilettenstuhl sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Die Desinfektion sollte nach jedem Toilettengang erfolgen.

- Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)
- Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Wiedereinsatz

- Der Toilettenstuhl ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Der Toilettenstuhl muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Technische Daten

Duschoilettenstuhl	TSF SB55	TSF SB60	TSF SB65
Bereifung	4 x 5" Rollen		
Material	Verchromter Stahlrohrrahmen Kunstleder, ABS		
Farbe	Chrom		
Sitzbreite (cm)	55	60	65
Gesamtbreite (cm)	65	70	75
Sitztiefe (cm)	48		
Sitzhöhe (cm)	53		
Armlehnenhöhe (cm)	22		
Gesamtlänge (cm)	89		
Gesamthöhe (cm)	96		
Max. Belastbarkeit (kg)	220		
Gewicht (kg)	19	20,5	22

Wartung

Der Toilettenstuhl ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler durchführen.

Maßnahme	täglich	monatlich	jährlich	Bemerkungen
Radlager ölen			X	Durch Fachhandel
Bremsen kontrollieren	X	X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Polsterung		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Rahmenteile		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Verbindungen		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel

Auf Anfrage des Fachhandels, lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen für Reparaturen und Instandsetzung zu kommen.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Trendmobil GmbH

Frohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9359-0

Telefax: +49 (0) 5254-9359-29

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com

